


# STOLIČKA PLANMECA LUMO

## Návod k použití

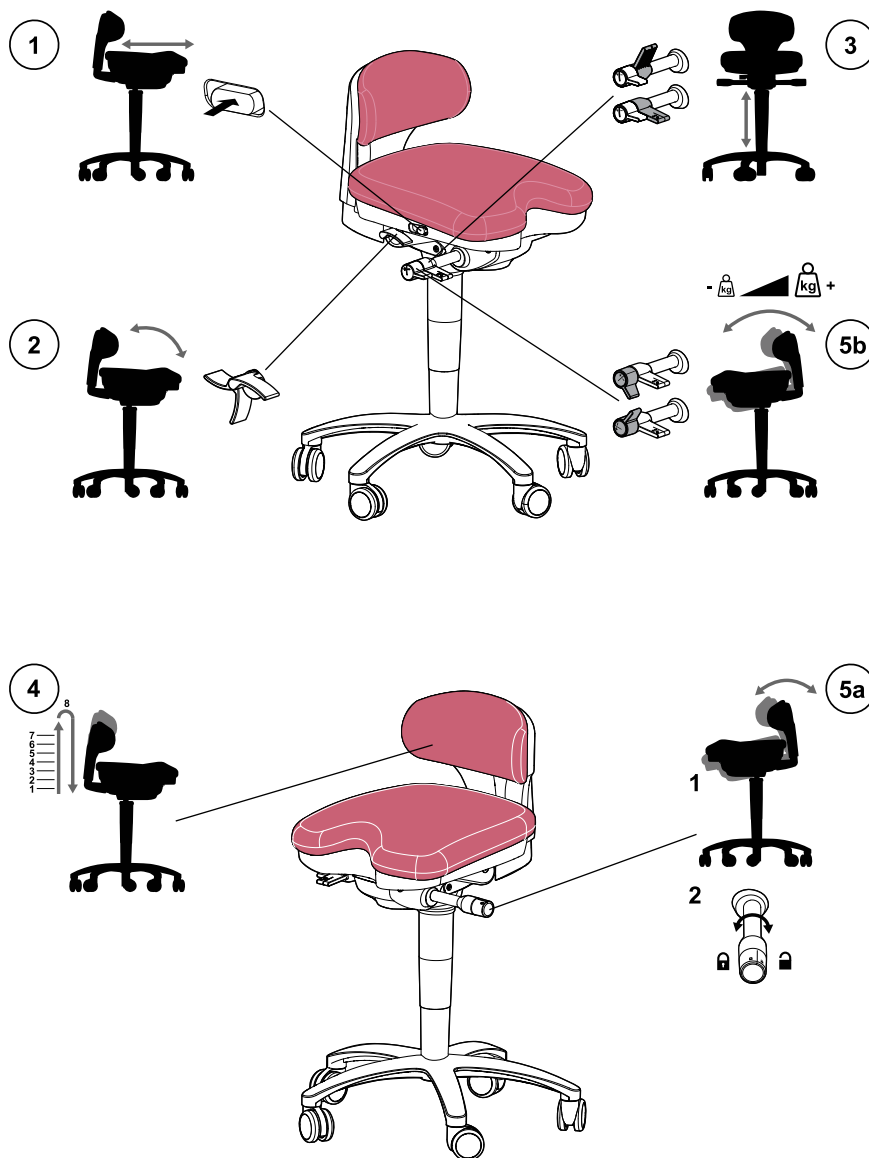

Zdravotnický prostředek podle nařízení (EU) 2017/745  
ZÁKLADNÍ UDI-DI (globální číslo modelu): 6430035420015D

Vážné nehody, ke kterým došlo v souvislosti se zařízením, musí být nahlášeny výrobci a příslušnému místnímu úřadu.



Výrobce (norma ISO 15223-1).



Sériové číslo (norma ISO 15223-1).



Přečtete si elektronický návod k použití (norma ISO 15223-1).

Tato příručka je dostupná v několika jazycích na <http://materialbank.planmeca.com>.

Copyright Planmeca

Číslo publikace 30044349 verze 3

Vydáno 3. září 2024


Anglický originál publikace:

Planmeca Lumo user's guide

Číslo publikace 10037699 verze 7

1. Hloubka sedáku	Požadovanou hloubku sedáku nastavíte stisknutím tlačítka na boku stoličky a současným posunutím sedáku dopředu nebo dozadu.
2. Úhel sedáku	Úhel sedáku lze vybrat ze třech poloh. Když páčka směřuje dopředu, zadní část sedáku je v nejnižší poloze. Stlačením páčky dolů zadní část sedáku mírně zvednete. Stlačením páčky tak, aby směřovala dozadu, zvednete zadní část sedáku do nejvyšší polohy.
3. Výšky sedáku	Zvedněte páčku a nastavte sedák do požadované výšky. Uvolněním páčky zajistíte sedák v dané poloze.
4. Výška opěrky zad	Zvedněte opěrku zad nahoru a nastavte její výšku tak, aby pohodlně podpírala dolní část vašich zad. Při zvedání se opěrka zad pohybuje nahoru v sedmi postupných krocích, a potom je opět možné stlačit opěrku zad dolů.
5a. Dynamický pohyb stoličky	Opřete se o opěrku zad a otočte knoflík do polohy <b>odemčeno</b> . Opěrka zad a sedák se nyní dynamicky pohybují podle pohybů vašeho těla. Otočením knoflíku do polohy <b>zamčeno</b> zajistíte sedák v dané poloze.
5b. Úprava odpružení	Po odjištění pohybu sedáku (viz 5a) můžete nastavit odpružení sedáku. Otočením knoflíku směrem ke znaménku + (plus) odpružení zvýšíte a otočením ke znaménku - (minus) odpružení snížíte.

## Rozměry

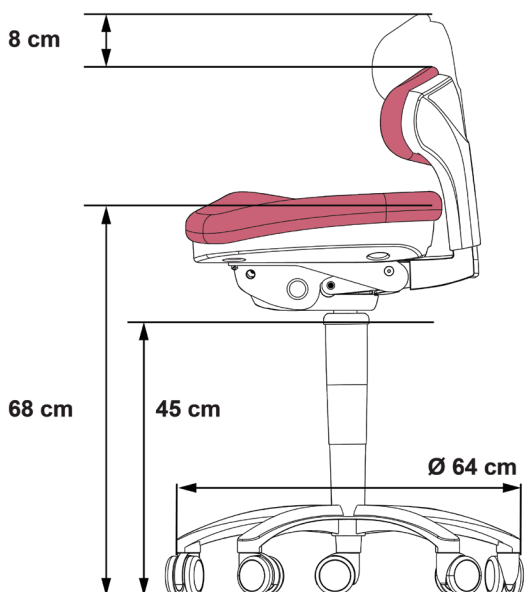

Nejnižší výška sedáku	45 cm (od podlahy ke spodní straně stoličky)
Nejvyšší výška sedáku	68 cm (od podlahy ke spodní straně stoličky)
Rozsah nastavení výšky sedáku	23 cm
Hloubka sedáku	42 cm
Šířka sedáku	41 cm
Rozsah nastavení opěrky zad	8 cm v 7 krocích
Vzdálenost od opěrky zad k sedáku (rozsah)	0–7 cm
Úhel opěrky zad a sedáku – rozsah nastavení	
Sklon opěrky zad	70° až 90° v krocích po 5° od vodorovné roviny
Sklon sedáku	0° až 5° v krocích po 2,5° od vodorovné roviny
Hmotnost	15 kg
Volně otočná kolečka	Ø 6,5 cm
Základna stoličky	Ø 64 cm

## Čištění

K otření skvrn a rozlitých tekutin z polstrování použijte slabý mýdlový roztok. Polstrování nechte přirozeně uschnout.

Pro dezinfekci polstrování doporučujeme použít prostředek Dürr FD 312 nebo podobný.

Všechny ostatní části pravidelně otírejte dezinfekčním prostředkem na povrchy schváleným společností Planmecca (Dürr FD 333 / FD 322).

## Údržba

Jestliže stolička vyžaduje údržbu, obraťte se na místního prodejce produktů Planmecca.